

NEPTUN[®] plug



Unser Neptun Plug Bio-Zementstopper

- Elastisches Biomaterial auf Gelatinebasis
- Resorbierbar innerhalb weniger Tage bei Körpertemperatur
- Seit über 10 Jahren bei der Implantation von Gelenkprothesen hervorragend bewährt
- Durchmesser 8 - 18 mm
- Schonende Zementierung des Markraumes
- Vermeidet, dass der Knochenzement zu weit in den Markraum vordringt, dadurch wird nur die notwendige Menge des Knochenzements zur Fixation der Prothese eingesetzt.
- Leichtere Zemententfernung bei Revisionen, keine Reste von PE-Restriktoren

Operationstechnik

- Die Prothese wird an den Setzstab gehalten, gemessen wird vom Beginn der Skalierung bis zum oberen Ende der Prothese, dort wird die Stellschraube am Instrumentarium fixiert.
- Wählen Sie die passende Probeolive und fixieren diese auf dem Setzstab.
- Versichern Sie sich, dass die Probeolive im Markraum 10-15 mm unterhalb der Prothesenspitze sitzt. Zur Orientierung dient die Stellschraube.
- Schrauben Sie anschließend die Spitze auf das Setzinstrumentarium, stecken Sie den Bio-Zementstopper in der Größe der Probeolive auf und führen diesen in den Markraum ein.
- Ziehen Sie das Setzinstrumentarium langsam durch leichtes Rechts-Links-Drehen aus dem Markraum heraus.
- Der Neptun-plug gewährleistet durch seine Flexibilität einen sicheren Abschluss.
- Der Knochenzement kann nun eingebracht werden.

Produkt	Inhalt pro Set/ Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell-Nr.
Neptun Plug	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770008
	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770010
	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770012
	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770014
	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770016
	resorbierbarer Knochenzementstopper	1 Stück	NP-770018
Neptun Plug	Setzinstrument für Markraumstopfen * 3-Teilig inkl. Probeoliven Größe ø 8-18mm	1 Stück	NP-367-007

Weitere Produkte



Generell wird die Verwendung von weiteren Komponenten der modernen Zementiertechnik empfohlen, um das Zementierergebnis zu optimieren.

INTERATIO-MediTec
 Medizintechnik Vertriebs GmbH
 Hochstraß 5
 94377 Steinach
 Fon +49 (0) 9428-81 99
 Fax +49 (0) 9428-73 18
 info@interatio-meditec.de

www.interatio-meditec.de

NEPTUN®
 Plug



ORTHOPÄDIE UNFALLCHIRURGIE NEUROCHIRURGIE / HNO